

BESTELLINFORMATION

Starter Kits		
BESCHREIBUNG	MANSCHETTE	CODE
VICTO STARTER KIT 3.7	3.7	KITVICTO-37
VICTO STARTER KIT 4.0	4.0	KITVICTO-40
VICTO STARTER KIT 4.5	4.5	KITVICTO-45
VICTO STARTER KIT 5.0	5.0	KITVICTO-50
VICTO STARTER KIT 5.5	5.5	KITVICTO-55

Accessories Kit	
BESCHREIBUNG	CODE
VICTO ACCESSORIES KIT	KITAC-02

victosphincter.com

Magnetresonanz (MR) Umgebung

Nichtklinische Tests haben gezeigt, dass VICTO MR-geeignet ist. Ein Patient mit diesem Implantat kann unter den folgenden Bedingungen sicher gescannt werden:



Statisches Magnetfeld von 1.5 Tesla und 3 Tesla, mit:

- Maximalem räumlichen Feldgradient von 12.800 G/cm (128 T/m)
- Maximales Kraftprodukt von 231 T²/m
- Theoretisch geschätzte maximale ganzkörperspezifische Absorptionsrate (SAR) von < 2 W/kg (normaler Betriebsmodus)



EINE NEUE GENERATION KÜNSTLICHER HARNRÖHRENSPHINKTER

- Minimalinvasive Adjustierung
- Vorkonnetiertes Implantat
- Ergonomisches Pumpen Design

VICTO KÜNSTLICHER HARNRÖHRENSPHINKTER

VICTO ist ein vorkonnectierter künstlicher Harnröhrenschließmuskel, der Druckanpassungen innerhalb eines minimalinvasiven ambulanten Verfahrens ermöglicht.


MINIMAL INVASIVES ANPASSUNGSVERFAHREN

Wegen des einzigartigen Pumpendesigns kann der Systemdruck in VICTO einfach über den selbstverschließenden Port, innerhalb eines ambulanten und einfach durchzuführenden Verfahrens, angepasst werden.




ERGONOMISCHES PUMPEN DESIGN

Die weiche Silikonpumpe hat ein leicht zu ertastendes Design, welches eine einfache Bedienung durch den Patienten ermöglicht. Mit nur einmal pumpen wird die Harnröhre dekomprimiert und die Miktion ermöglicht.

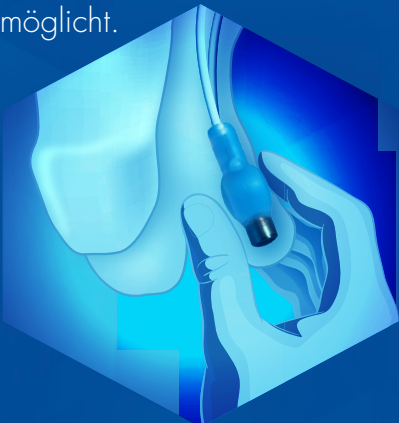

VORKONNTEKTIERTES IMPLANTAT

VICTO ist bereits vorkonnectiert und kann direkt befüllt und implantiert werden.

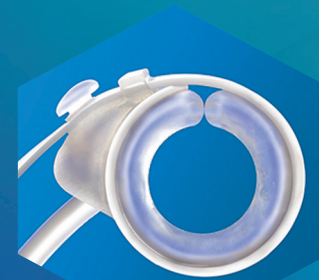

VICTO ist in fünf Manschettengrößen erhältlich, welche intraoperativ mit dem zugehörigen Maßband aus dem Accessories Kit ausgewählt werden kann.

3.7 CM

4.0 CM

4.5 CM

5.0 CM


5.5 CM

VERFAHREN ZUR AKTIVIERUNG & ANPASSUNG

Vorbereitung während der Operation: +13ml

Aktivierung +4ml

Individuelle Anpassung (+1ml), falls notwendig

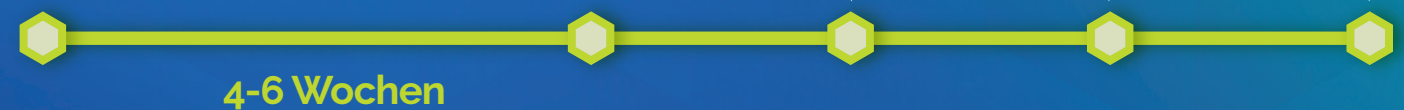

NADELEMPFEHLUNG:

Für die Befüllung oder Flüssigkeitsentnahme während der Aktivierung, Anpassung oder Deaktivierung von VICTO wird die Verwendung einer nicht stanzenden Nadel Größe 25G empfohlen.

ZWECKBESTIMMUNG

VICTO ist für die Wiederherstellung der Harnkontinenz der definierten Patientengruppe bestimmt.

INDIKATIONEN

VICTO ist für die Behandlung der männlichen Belastungsharninkontinenz bestimmt.

KONTRAINDIKATIONEN

- Unkontrollierte Detrusorüberaktivität
- Unbehandelte oder irreversible intravesikale Obstruktion
- Beeinträchtigte kognitive oder manuelle Fähigkeiten, die den Patienten in der Handhabung des Implantats einschränken
- Unbehandelte akute Harnwegsinfektion oder aktive Infektion an den Operationsstellen (z. B. Perineum, Skrotum, Unterbauch)
- Bekannte Allergie gegen Silikon.