

DEAKTIVIERUNGS VERFAHREN

BENÖTIGTE MATERIALIEN:

- Sterile 10ml Spritze.
- Nicht-stanzende Nadel 25G x 5/8".

ANDERE EMPFOHLENE NICHT-STANZENDE NADELN:

- Gripper Micro® Blunt Cannula, Non coring safety needle 20G x 1" (Ref: 21-3257-24).
- Surecan® prosty 20G x 40mm (Ref: 04439953).
- Surecan® Straight non-coring needle 22G x 30mm (Ref: 04439848).

SCHRITTE

Wenn der Patient für einen medizinischen Eingriff eine Katheterisierung oder einen transurethralen Eingriff benötigt, sollte VICTO deaktiviert werden, indem Flüssigkeit wie folgt aus dem System entfernt wird:

1 Identifizieren Sie die Pumpe im Hodensack des Patienten. Die Haut des Hodensacks sollte mit einem Antiseptikum gereinigt werden, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

NOTE Eine Lokalanästhesie in dem Bereich kann gemäß dem vom Krankenhaus genehmigten Verfahren durchgeführt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Pumpe dabei nicht beschädigt wird.

2 ertasten Sie die Pumpe mit sauberen Handschuhen durch die Haut des Hodensacks um den Zugangsport zu lokalisieren. (Abb.1)

NOTE Sie sollten den runden Anschluss der Pumpe unter der Haut lokalisieren und ihn fest in einer festen Position halten. (Abb.2)


3 Verbinden Sie eine leere 10 ml Spritze an eine sterile nicht-stanzende Nadel.

4 Führen Sie die nicht-stanzende Nadel in den Zugangsport ein, bis sie die Titan-Schutzkappe berührt. Die Nadel sollte senkrecht und konzentrisch zum Port eingeführt werden. (Abb.3)

WARNUNG Verwenden Sie keine anderen Nadeln als die angegebenen, da dies den selbstdichtenden Port beschädigen und die Funktionalität des Implantats beeinträchtigen kann. Beim Einführen der Nadel ist Vorsicht geboten, damit nicht die Wände der Pumpe außerhalb des selbstdichtenden Anschlusses durchstoßen werden.

5 Entnehmen Sie 7 ml aus dem VICTO, indem Sie den Kolben der Spritze ziehen. (Abb. 4)

6 Ziehen Sie die Nadel aus dem Port der Pumpe.

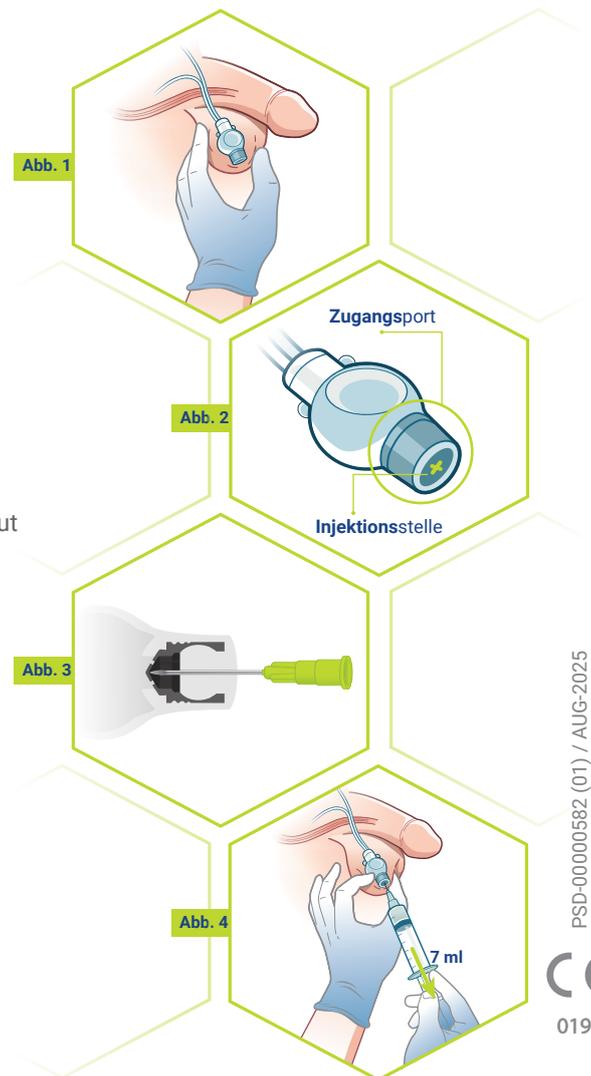

PSD-00000582 (01) / AUG-2025

CE
0197

WICHTIG: Nach Durchführung des Deaktivierungsvorgangs, übt der VICTO-Schließmuskel keinen Druck mehr auf die Harnröhre aus. Um seine normale Funktion nach Abschluss des medizinischen Eingriffs beim Patienten wiederherzustellen, sollten 7 ml erneut in das VICTO-System injiziert werden. Bitte wenden Sie sich an den auf dem Implantatausweis (VICTO-ID-Karte) angegebenen Chirurg:in, um das System wieder zu aktivieren.