




Gebogene Einführhilfe
Einfacher Zugang zum SSL durch den anterioren oder posterioren Ansatz. Erfordert nur minimale Dissektion.

RIG RETRACTABLE INSERTION GUIDE LEITFADEN


Schutzhüllen Verriegelungs- und Freigabemechanismus
Einfaches Verriegeln und Freigeben der Schutzhülle.

Rückziehmeechanismus
Einfaches Einsetzen und Lösen des TAS-Ankers


Ergonomischer Griff
Sicheres manövrieren

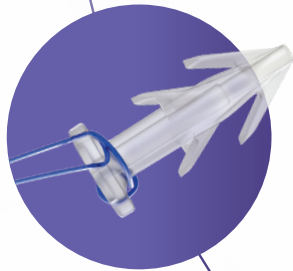

ANCORIS
POP REPAIR SYSTEM

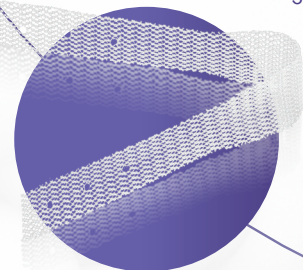

Splentis
POP TISSUE ANCHORING SYSTEM

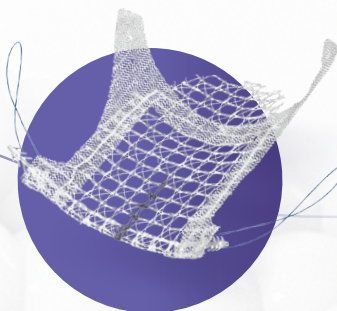


Calistar^S
SINGLE INCISION POP REPAIR SYSTEM


SCHRITT FÜR SCHRITT



Die Anker des Tissue Anchoring System (TAS) haben ein Loch, das auf der verlängerten Spitze des RIG's platziert werden kann. Stellen Sie sicher, dass der Schieber am Griff des RIG's nach oben geschoben wurde, um die Spitze des RIG's zu verlängern, bevor der TAS-Anker aufgesetzt wird.

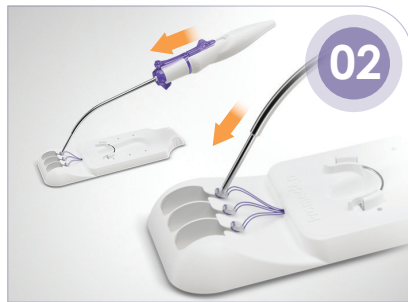


Entnehmen Sie mit der verlängerten RIG-Spitze ein TAS aus der Spendereinheit. Sobald ein „klick“ vernehmbar ist, ist der Anker auf dem RIG befestigt.

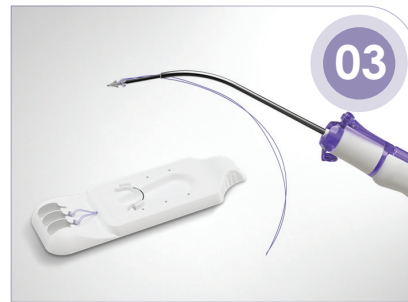


Das TAS kann nun sicher aus der Spendereinheit entnommen werden. Stellen Sie sicher, dass der Anker fest auf der Spitze des RIG's befestigt ist.




Legen Sie die Fadenenden um den Fixierungspunkt am Griff.

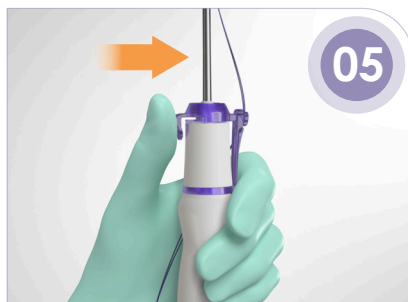


Stellen Sie sicher, dass sich der Verriegelungs- und Freigabemechanismus für die Schutzhülle, am Griff des RIG's, in einer zurückgeschobenen, entriegelten Position befindet.

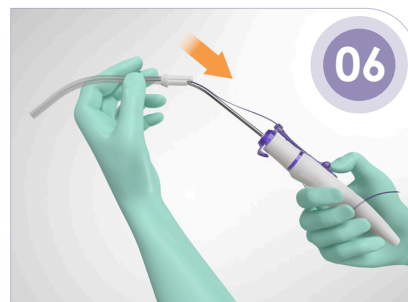

Die Schutzhülle wird über das RIG gezogen, bis ein Klicken vernehmbar ist. Die Schutzhülle ist jetzt sicher auf dem RIG befestigt.

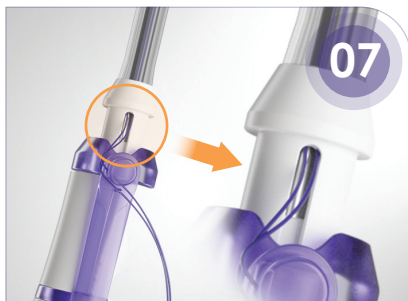

Stellen Sie sicher, dass die Fäden durch den Schlitz am unteren Ende der Schutzhülle geführt werden.

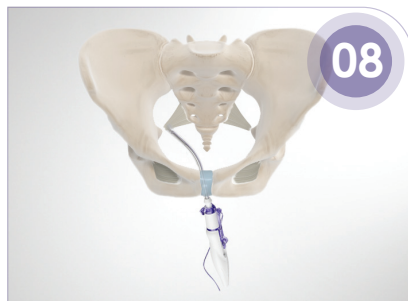


TAS Implantation: Führen Sie das RIG zum Implantieren des TAS zum SSL.



Sobald der Anker zu seiner endgültigen Position geführt wurde, lösen Sie die Schutzhülle, indem Sie den Freigabemechanismus drücken. Setzen Sie das TAS mit festem Druck in das SSL ein.



Lösen Sie den Anker von der verlängerten RIG-Spitze, indem Sie den Schieber am Griff nach unten bewegen. Das RIG kann dann sicher mit der Schutzhülle entfernt werden.

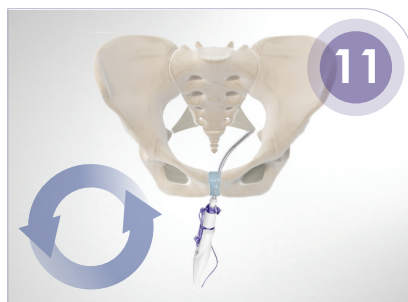

Zweite TAS Implantation: Entfernen Sie die Schutzhülle vom RIG, um den zweiten TAS auf der kontralateralen Seite zu implantieren. Starten Sie dafür mit Schritt 1.