

Verlengde RIG TIP

Beschermende buis

Bescherming van het omliggende weefsel tijdens de implantatieprocedure.

Gebogen geleider

Gemakkelijke toegang tot SSL via de anterior en posterior benadering. Beperkte dissectie vereist.

RIG RETRACTABLE INSERTION GUIDE HANDLEIDING

Beschermende buisvergrendeling en ontgrendelingsmechanisme

Eenvoudig vergrendelen en ontgrendelen van de beschermende buis.

Intrekbaar mechanisme

Eenvoudig inbrengen en loslaten van TAS-anker.

Ergonomische handgreep

Veilig manoeuvreren

ANCORIS
POP REPAIR SYSTEM


Splentis
POP TISSUE ANCHORING SYSTEM

Calistar^S
SINGLE INCISION POP REPAIR SYSTEM


STAP VOOR STAP



De TAS heeft een gat dat op de punt van de RIG kan worden geplaatst. Zorg ervoor dat de schakelaar op het handvat van de RIG in de bovenste stand is gedrukt om de punt van de RIG uit te schuiven.

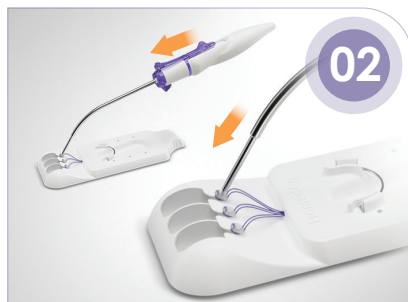


Pak een TAS uit de dispenserunit door de verlengde RIG-tip in de TAS te plaatsen en naar beneden te drukken. Zodra u een klik hoort, is het anker aan de RIG bevestigd.

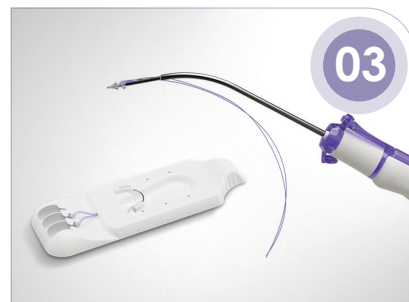


De TAS kan nu veilig uit de dispenser worden verwijderd. Zorg ervoor dat het anker stevig aan de RIG-tip is bevestigd.




Plaats de TAS-hechtingen rond het fixatiepunt op het handvat.

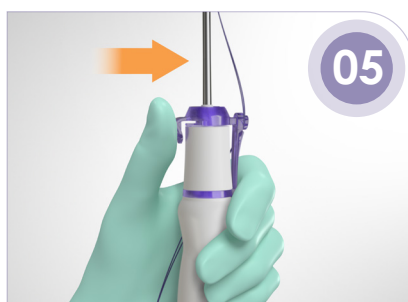


Zorg ervoor dat de vergrendeling van de beschermhuis en het ontgrendelingsmechanisme in een teruggedrukte, vergrendelde positie staan.

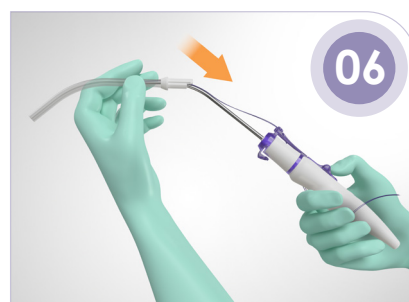

Trek de beschermhuis over de RIG totdat u een klik hoort. De eschermbuis is nu stevig bevestigd aan de RIG.

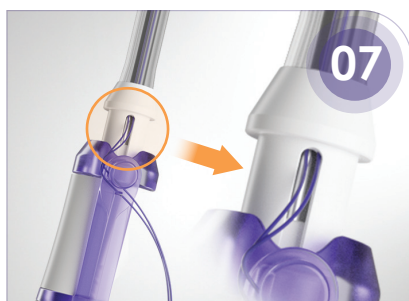

Zorg ervoor dat de TAS-hechtingen door de sleuf aan de onderkant van de beschermhuis worden gevoerd.

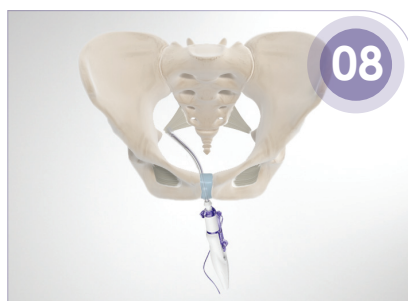


Voor TAS-implantatie, leid de RIG naar het sacrospinale ligament.



Zodra het anker in de definitieve positie is geplaatst, moet de eschermbuis worden losgemaakt door de vergrendeling van de beschermhuis in de ontgrendelde positie te duwen. Vervolgens kan de TAS met stevige druk in het sacrospinale ligament worden ingebracht.



Laat de TAS los door de schakelaar op de RIG-hendel naar achteren te schuiven. De TAS-hechting blijft uit de introitus hangen totdat deze nodig is.

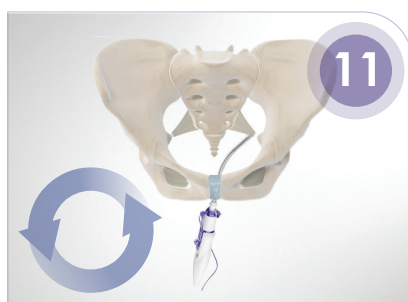

Verwijder de beschermhuis van de RIG om te beginnen met het implanteren van de tweede TAS. Begin het proces vanaf stap 1.