

A close-up portrait of a middle-aged man with short, white hair, smiling warmly. He is wearing a light blue and white striped shirt. The background is a soft-focus outdoor scene with green foliage. The entire image is overlaid with a geometric pattern of translucent blue and green hexagons.

LEVEN MET
VICTO

INFORMATIE
VOOR PATIËNTEN

VICTO

Adjustable Artificial Sphincter



Continentie herstellen

VICTO is een instelbare kunstmatige urinaire sluitspier die een betrouwbare oplossing biedt voor de behandeling van inspanningsincontinentie bij mannen. Het bestaat uit drie componenten: een controlepomp, een drukregulerende ballon en een manchet voor de plasbuis. Alle drie de onderdelen vormen een samenhangend hydraulisch systeem dat de natuurlijke functie van uw sluitspier simuleert.

Deze folder is bedoeld om u als patiënt alle informatie te geven over het hulpmiddel dat bij u zal worden geïmplant (of dat bij u reeds geïmplant is):

-  Informatie over de onderdelen van VICTO en hoe ze werken
-  Hoe u het implantaat correct gebruikt
-  Informatie over poliklinische ingrepen om de systeemdruk aan te passen
-  Belangrijke informatie en antwoorden op FAQ's

Wat is urine-incontinentie bij mannen?


Urine-incontinentie is een complexe aandoening die miljoenen mannen treft. Deze aandoening gaat vaak gepaard met een verminderde levenskwaliteit als gevolg van de negatieve invloed die het kan hebben op sociale en werk-gerelateerde activiteiten. Het kan zelfs uw gevoel van eigenwaarde aantasten.

Inspanningsincontinentie is een vorm van onvrijwillig urineverlies die samenhangt met een tekortkoming van de sluitspier om de urine in de blaas te houden terwijl er druk op wordt uitgeoefend, zoals hoesten, niezen, lachen of sporten. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een eerdere prostaatbehandeling zoals een prostaatverwijdering.

VICTO componenten

DE CUFF

De manchet wordt rond de plasbuis (urethra) geplaatst en oefent druk uit om deze dicht te houden en continentie te garanderen.

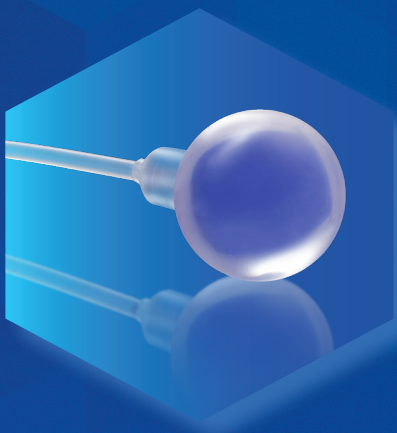

DE DRUK-REGULERENDE BALLON

De drukregulerende ballon, ook wel "reservoir" genoemd, wordt in de buik geplaatst en regelt de druk van de manchet, afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof in het systeem.


DE POMP

De pomp wordt in het scrotum geplaatst. Wanneer u aandrang heeft om te plassen, kunt u stevig in de pomp knijpen (en weer loslaten) waardoor de druk in de manchet afneemt zodat u kunt plassen en de blaas legen.




Hoe VICTO werkt

Zodra VICTO 4-6 weken na de implantatie is geactiveerd, houdt het de plasbuis gesloten. Alleen wanneer u wilt plassen, knijpt u handmatig één keer in de pomp waardoor de plasbuis geopend wordt en plassen mogelijk is.

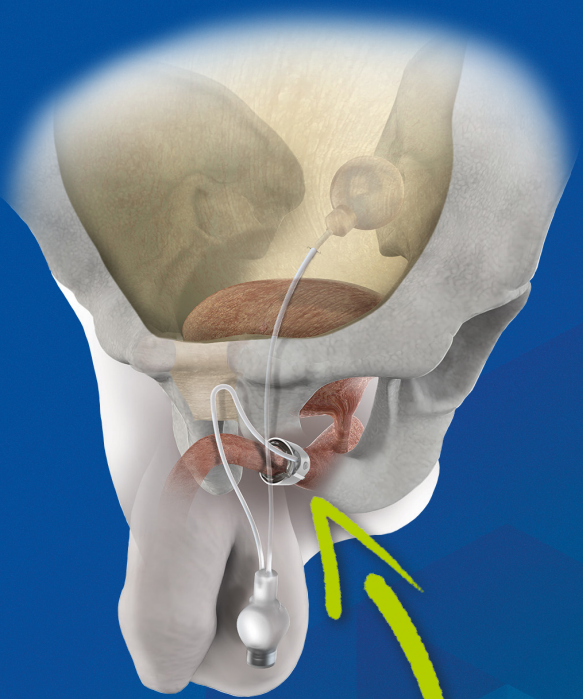


Continentie

Manchet is gesloten en de plasbuis is geblokkeerd

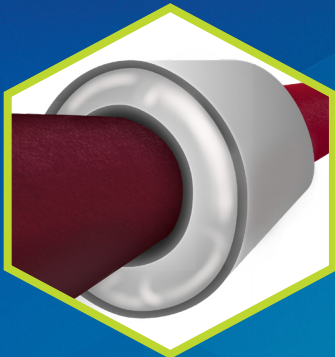

Tijdens het plassen

Manchet wordt geopend om de blaas te legen


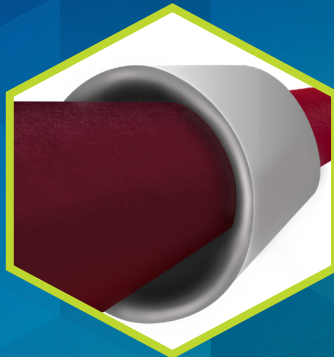


Gebruik van VICTO

1 Open de urethrale manchet voor mictie

Om uw blaas goed te legen, palpeert u de pomp die zich in uw scrotum bevindt en pakt u deze aan de platte kanten vast met uw duim en wijsvinger. Knijp dan stevig in de pomp. Nadat u de pomp hebt losgelaten, gaat de manchet open om mictie mogelijk te maken. Eén keer stevig knijpen (en loslaten) is voldoende om de druk van de plasbuis te halen.

Het hydraulische mechanisme van het implantaat sluit de manchet automatisch en bereikt de maximaal ingestelde druk na ongeveer 2 minuten. Er is dus genoeg tijd om uw blaas volledig te legen.

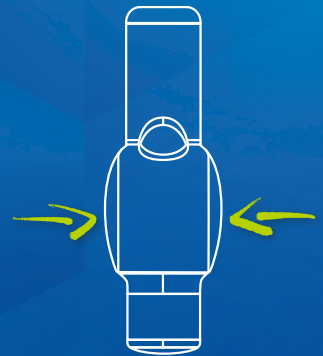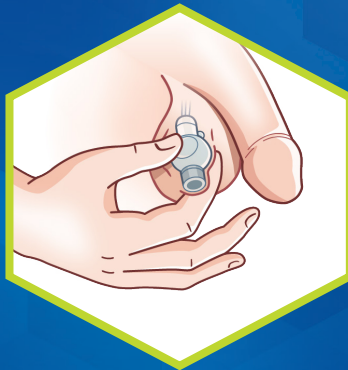

2 Snelle sluitingsfunctie

Als een snellere sluiting van de manchet vereist is, kan dit worden bereikt met de "snelle sluitingsfunctie" van het implantaat. Zoek hiervoor de twee voelbare noppen of uitsteeksels aan de zijkanten van de hals van de pomp en druk er net boven gedurende ongeveer 5-10 seconden om de urethra volledig te sluiten. Dit mechanisme moet niet worden gebruikt na elke keer dat u uw blaas leegt, alleen in omstandigheden waarin u geen tijd heeft om te wachten op de automatische sluiting.



3

Activering, aanpassing & deactivering van VICTO

De activering van uw VICTO wordt uitgevoerd als een poliklinische ingreep in een minimaal invasieve procedure, normaal gesproken ongeveer 4 tot 6 weken na de implantatiechirurgie, afhankelijk van het individuele genezingsproces. Om de systeemdruk te verhogen zal uw arts 4 ml vloeistof in het implantaat injecteren via de poort op de pomp (met een naald door de huid en via de poort van de pomp).

Als er geen urinecontinentie wordt bereikt door de activering van de VICTO, kunnen er in de toekomst aanpassingen worden gedaan door extra vloeistof te injecteren om de druk die de manchet op de urethra uitoefent te verhogen.

Om VICTO correct te deactiveren, moet de arts 7 ml vloeistof uit de VICTO verwijderen tijdens een poliklinische ingreep. Voor de reactivering moet de arts dezelfde hoeveelheid vloeistof die eerder is verwijderd opnieuw in het implantaat spuiten. VICTO mag alleen worden gedeactiveerd door medisch personeel.



Meer informatie (voor u én uw arts) kunt vinden op onze webpagina


www.promedon-upf.com/victo

Belangrijke informatie

Device Identification Card

Deze kaart bevat belangrijke informatie over uw implantaat. De kaart moet worden ingevuld door de chirurg en moet aan u worden gegeven na de operatie, voordat u het ziekenhuis verlaat. We raden u aan deze kaart goed te bewaren en bij u te dragen, omdat hij handig is in geval van nood.

Uw persoonlijke implantaatkaart bevat belangrijke informatie die u vele jaren nodig kunt hebben. Overhandig het aan de arts wanneer een medische ingreep nodig is.

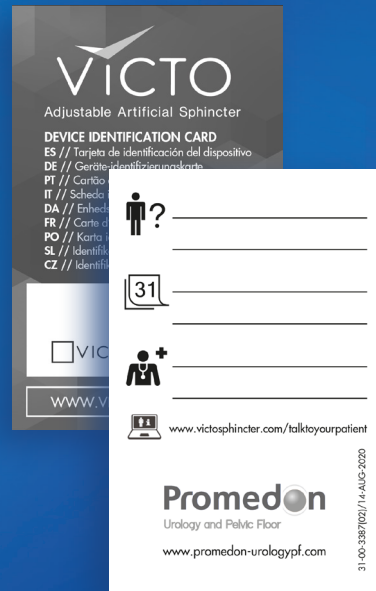

VICTO
Adjustable Artificial Sphincter

DEVICE IDENTIFICATION CARD
ES // Tarjeta de identificación del dispositivo
DE // Geräte-identifizierungskarte
PT // Cartão
IT // Scheda
DA // Enheds
FR // Carte d
PO // Karta
SL // Identifi
CZ // Identifi

 ? _____

 31 _____

 _____

 www.victosphincter.com/talktoyourpatient

Promedon
Urology and Pelvic Floor
www.promedon-urology.com

31-00-3387102 / 14-AUG-2020

Medische ingrepen

Artsen en zorgverleners moeten worden geïnformeerd over uw VICTO implantaat. Dit is vooral belangrijk voor ingrepen waarbij een katheter of een ander instrument in de plasbuis moet worden ingebracht. Als een ingreep via de urethra wordt uitgevoerd zonder voorafgaande deactivering van VICTO, is ernstig letsel aan de urethra of schade aan het implantaat mogelijk. Dergelijke schade kan chirurgische verwijdering van het implantaat vereisen.

Wanneer moet er contact worden opgenomen met een arts?

Net als bij elk ander medisch hulpmiddel is er altijd kans op complicaties, infecties of bijwerkingen. Als een van de volgende situaties zich voordoet, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

- Ongewone of langdurige pijn
- Roodheid, zwelling of uitslag rond de operatie-littekens of het scrotum
- Etterige afscheiding uit de incisie
- Problemen met plassen
- Koorts
- Delen van het apparaat zijn zichtbaar door de huid
- De pomp kan niet worden gelokaliseerd
- De pomp kan niet worden bediend of is moeilijker te bedienen dan normaal
- Terugkerende inspanningsincontinentie

Veelgestelde vragen FAQ

Hieronder staan vragen die vaak gesteld worden over “Leven met VICTO”. Als u nog vragen hebt of speciale medische zorgen, neem dan contact op met uw arts.

Kan ik fietsen?

Overleg met uw arts voordat u gaat fietsen na uw operatie.

Zal VICTO invloed hebben op seksuele activiteit?

VICTO zou geen negatief effect moeten hebben op seksuele activiteit. Toch zou het goed zijn als u uw partner informeert over uw implantaat, zodat hij of zij het apparaat begrijpt, bijvoorbeeld waar de controlepomp zit en hoe het werkt.

Hoe zit het met activiteiten die mijn lichaam extra belasten?

We raden u aan om alle sporten en andere activiteiten af te stemmen met uw arts.

Is MRI (magnetic resonance imaging) mogelijk?

VICTO is MRI-voorwaardelijk, wat betekent dat beeldvorming veilig is voor scans onder statische magnetische velden van 1,5T en 3T. Deze informatie is te vinden op uw Device Identification Card.

Moet ik ergens speciaal op letten bij de veiligheidscontroles op het vliegveld?

Nee, de kleine hoeveelheid metaal in het implantaat veroorzaakt geen alarm op de luchthaven.




VICTO

Adjustable Artificial Sphincter

[illegible]



Urology and Pelvic Floor

Bedrijfsinformatie: Distribution EMEA & APAC

Promedon GmbH | An der Alten Spinnerei 5 | 83059 Kolbermoor | Duitsland
orders@promedon.com | Telefoon: +49 8031 900 400 | Fax: +49 08031 900 4040

Gefabriceerd door: PROMEDON S.A. | www.promedon-upf.com

PSD-00000564 (01) / MAY:2025

