

O esfíncter artificial ajustável VICTO tem duas alternativas de desativação:

A DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA: se o paciente necessitar de uma sonda urgente ou então de um procedimento breve (por exemplo, uma cistoscopia), deve-se pressionar a bomba 15 vezes para desinflar o manguito. A uretra se abrirá durante 30 minutos.

B DESATIVAÇÃO PERMANENTE: se o paciente necessitar de uma intervenção médica permanente, o implante VICTO deverá ser completamente desativado. Para garantir que a desativação seja realizada corretamente, o médico deverá proceder da seguinte maneira:

1

Identificar a bomba no escroto do paciente (Figura 1).

2

Limpar a pele com uma substância antisséptica antes de perfurar, pois desta maneira minimizará o risco de infecções. Injetar com cuidado o anestésico tópico na pele do escroto.

Importante: cuidado para não danificar a bomba durante o procedimento.

3

Reconhecer a porta da bomba com dois dedos, alongar bem a pele sobre o extremo dela (Figura 2).

4

Utilizar uma seringa de 10 ml vazia e esterilizada com uma agulha do tipo Huber (não perfilada) para extrair a solução fisiológica do sistema.

5

Inserir a agulha na parte frontal da porta autove-dante paralelamente à bomba (Figura 3).

6

Extrair 7 ml de solução fisiológica do sistema.

7

Retirar a seringa da porta.

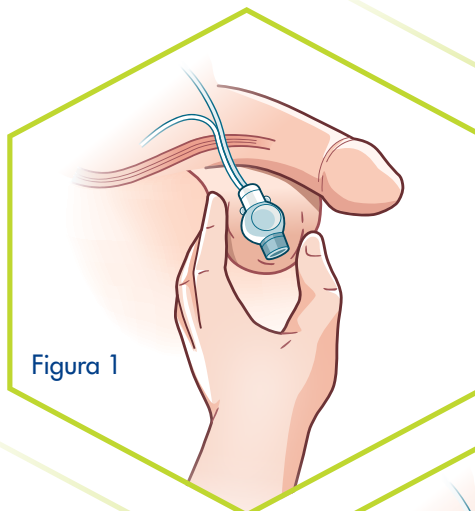


Figura 1

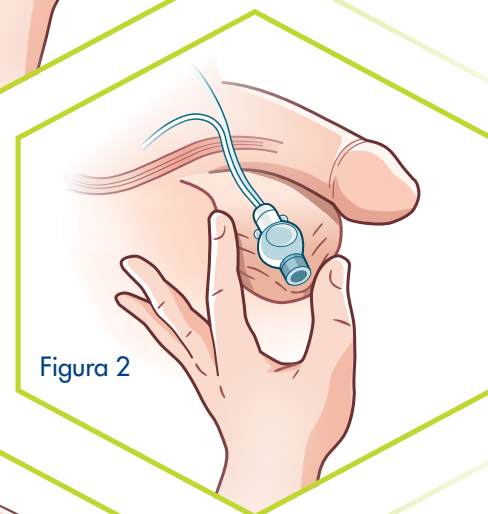


Figura 2

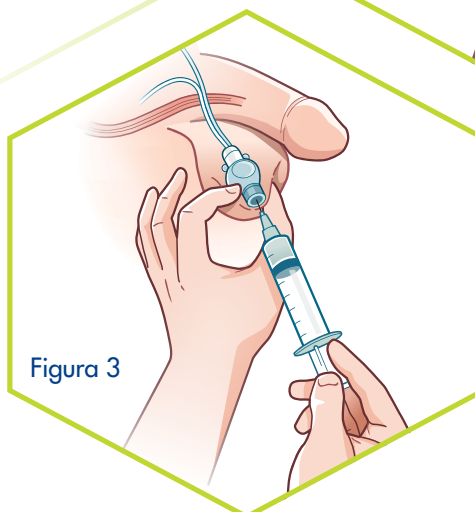


Figura 3

NOTA:

- Todos os componentes necessários para a ativação ou desativação do sistema VICTO estão disponíveis no Kit de ajuste (KIT-AD-06).

IMPORTANTE: uma vez finalizado o procedimento de desativação, o VICTO não oferecerá mais o mesmo nível de continência. Para recuperar o funcionamento normal do dispositivo, uma vez que foi finalizado o procedimento médico no paciente, entre em contato com o cirurgião que consta no cartão de identificação do dispositivo para realizar sua reativação.