

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

Kit Inicial		
DESCRIÇÃO	TAMANHO DE CUFF	CÓDIGO
VICTO KIT INICIAL 3.7	3.7	KIT-AUS-37-WS
VICTO KIT INICIAL 4.0	4.0	KIT-AUS-40-WS
VICTO KIT INICIAL 4.5	4.5	KIT-AUS-45-WS
VICTO KIT INICIAL 5.0	5.0	KIT-AUS-50-WS

Kit de Acessórios	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO
VICTO KIT DE ACCESSÓRIOS	KIT-AC-01
Kit de Ajuste	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO

victosphincter.com

KIT-AD-06

Ambiente de Ressonância Magnética (Rm)

Os testes não clínicos demonstraram que o Victo é condicional à RM. Um paciente com este dispositivo pode ser escaneado em segurança nas seguintes condições:


VICTO KIT DE AJUSTE



- Campo magnético estático de 1.5 Tesla e 3 Tesla, com
- Gradiente máximo do campo espacial de 12.800 G/cm (128 T/m)
- Produto de força máxima de 231 T²/m
- Estimativa teórica da média máxima do corpo inteiro (WBA) taxa de absorção específica (SAR) de <2 W/kg (Modo de Funcionamento Normal)





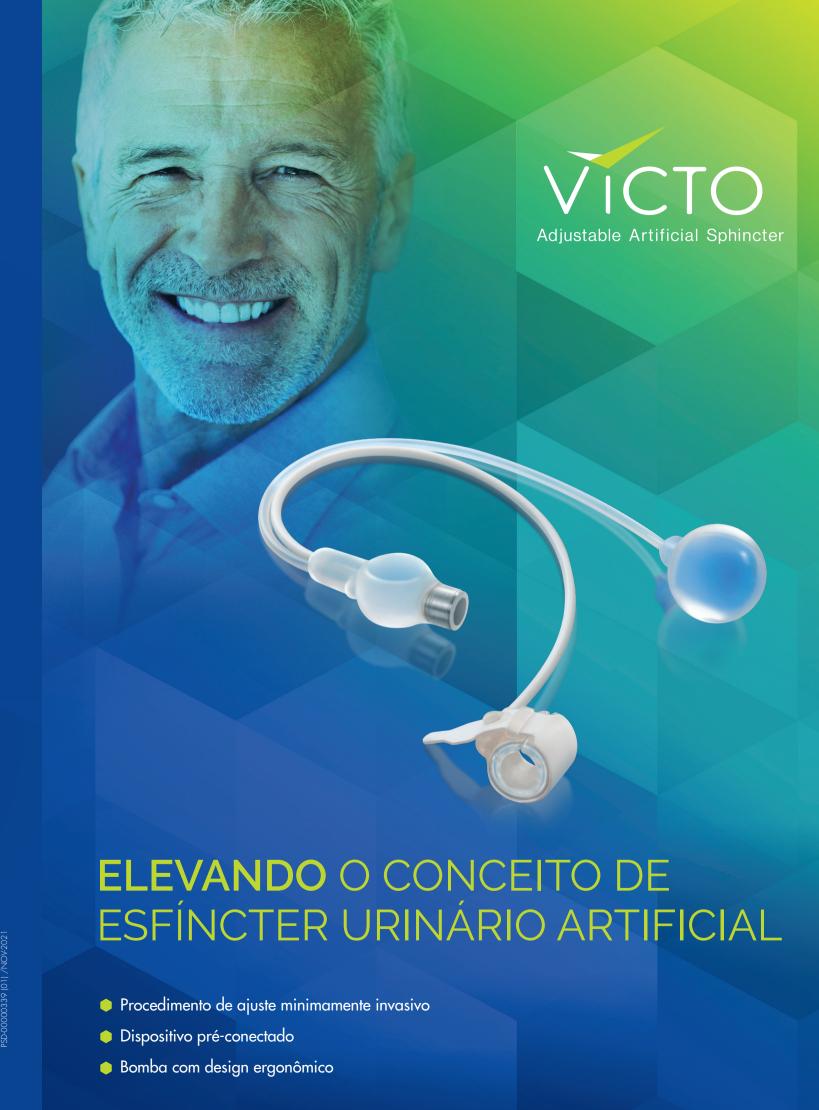

VICTO ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL.

VICTO é um esfíncter urinário artificial pré-conectado que permite ajustes de pressão com um procedimento ambulatorial minimamente invasivo.





VICTO está disponível em 4 tamanhos diferentes de manguito, que podem ser selecionados no intraoperatório utilizando a fita de seleção do tamanho do manguito, fornecida no Kit de Acessórios.









ATIVAÇÃO & PROCEDIMENTO DE AJUSTE



USO PRETENDIDO

VICTO destina-se ao restabelecimento da continência urinária em determinada população de pacientes.

INDICAÇÕES

VICTO é indicado para o tratamento de incontinência urinária de esforço masculina.

CONTRAINDICAÇÕES

As principais contraindicações para a implantação do VICTO são:

- Instabilidade do detrusor não controlada.
- Problemas que afetam a destreza manual ou motivação e que podem impedir que o paciente opere o dispositivo.
- Infecção aguda do trato urinário que pode levar a complicações pós-operatórias.
- Pacientes que o cirurgião determinar como não adequados devido a riscos associados às intervenções cirúrgicas abertas e/ou com o histórico médico dos pacientes (problemas físicos ou mentais).
- Hipersensibilidade conhecida à borracha de silicone.