

PROCESO DE DESACTIVACIÓN

MATERIALES NECESARIOS:

- Jeringa estéril de 10 ml.
- Aguja no perfilada de 25G x 5/8".

OTRAS AGUJAS NO PERFILADAS RECOMENDADAS:

- Gripper Micro® Blunt Cannula, Non coring safety needle 20G x 1" (Ref: 21-3257-24).
- Surecan® prosty 20G x 40mm (Ref: 04439953).
- Surecan® Straight non-coring needle 22G x 30mm (Ref: 04439848).

PASOS

Si el paciente necesita una cateterización o un procedimiento transuretral para cualquier intervención médica, VICTO debe ser desactivado extrayendo líquido del sistema de la siguiente manera:

- 1 Identifique la bomba de control en el escroto del paciente. La piel escrotal debe limpiarse con una sustancia antiséptica para minimizar el riesgo de infección.

NOTA Se puede aplicar anestesia local en la zona de acuerdo con el procedimiento aprobado por el hospital, teniendo cuidado de no dañar la bomba de control durante el proceso.

- 2 Utilizando guantes limpios, palpe la bomba de control a través de la piel escrotal y localice el puerto de acceso. (Fig.1)

NOTA Debe identificar el puerto redondo de la bomba debajo de la piel y sostenerlo firmemente en una posición fija. (Fig.2)


- 3 Conecte una jeringa vacía de 10 ml a una aguja no perfilada esterilizada.

- 4 Introduzca la aguja no perfilada en el puerto de acceso hasta que haga contacto con la copa de titanio. La inserción de la aguja debe ser perpendicular y concéntrica al puerto. (Fig.3)

ADVERTENCIA No utilice una aguja diferente a las indicadas, ya que podría dañar el puerto autosellante y afectar la funcionalidad del implante. Se deben tomar precauciones al insertar la aguja para no perforar las paredes de la bomba en zonas que no sean el puerto autosellante.

- 5 Extraiga 7 ml del VICTO tirando del émbolo de la jeringa. (Fig.4)

- 6 Retire la aguja del puerto de la bomba.

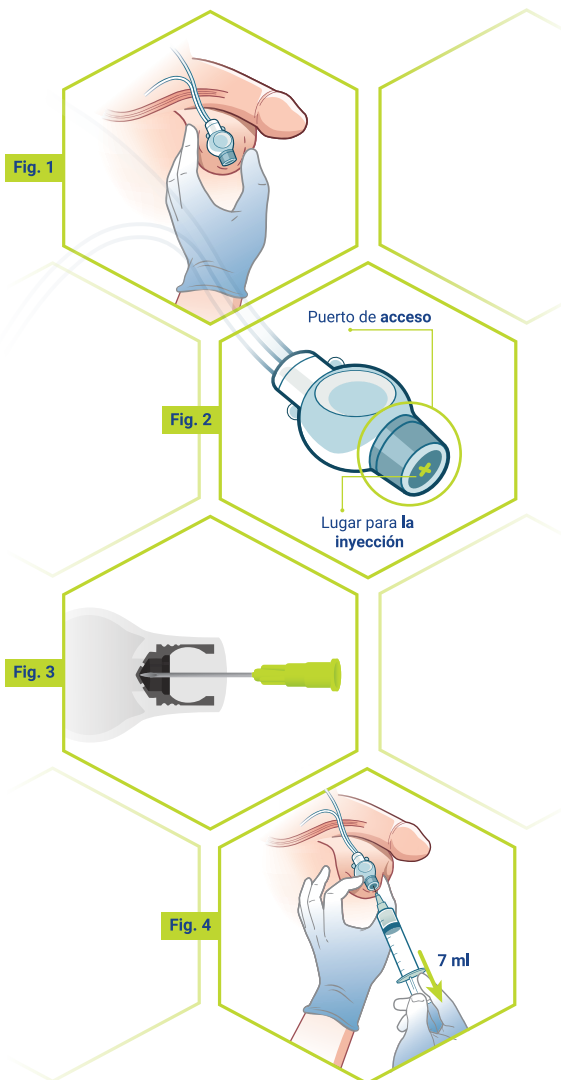

PSD-00000626 (01) / JUL-2026

IMPORTANTE: Después de realizar el proceso de desactivación, el esfínter VICTO ya no proporcionará presión alrededor de la uretra. Para restaurar su funcionamiento normal una vez completada la intervención médica del paciente, se deben volver a inyectar 7 ml en el sistema VICTO.

Por favor, póngase en contacto con el cirujano indicado en la tarjeta de identificación del dispositivo (Tarjeta de Identificación del Dispositivo) para volver a activar el producto.