

BESTELLINFORMATION

Starter Kits		
BESCHREIBUNG	MANSCHETTE	CODE
VICTO STARTER KIT 3.7	3.7	KIT-VICTO-37
VICTO STARTER KIT 4.0	4.0	KIT-VICTO-40
VICTO STARTER KIT 4.5	4.5	KIT-VICTO-45
VICTO STARTER KIT 5.0	5.0	KIT-VICTO-50
VICTO STARTER KIT 5.5	5.5	KIT-VICTO-55

Accessories Kit	
BESCHREIBUNG	CODE
VICTO ACCESSORIES KIT	KIT-AC-02

victosphincter.com

Magnetresonanz (MR) Umgebung

Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass VICTO MR-geeignet ist. Ein Patient mit diesem Implantat kann unter den folgenden Bedingungen sicher gescannt werden:



Statisches Magnetfeld von 1.5 Tesla und 3 Tesla, mit:

- Maximalem r\u00e4umlichen Feldgradient von 12.800 G/cm (128 T/m)
- Maximales Kraftprodukt von 231 T²/m
- Theoretisch geschätzte maximale ganzkörperspezifische Absorptionsrate (SAR) von < 2 W/kg (normaler Betriebsmodus)







VICTO KÜNSTLICHER HARNRÖHRENSPHINKTER

VICTO ist ein vorkonnektierter künstlicher Harnröhrenschließmuskel, der Druckanpassungen innerhalb eines minimalinvasiven ambulanten Verfahrens ermöglicht.

MINIMAL INVASIVES ANPASSUNGSVERFAHREN

Wegen des einzigartigen Pumpendesigns kann der Systemdruck in VICTO einfach über den selbstverschließenden Port, innerhalb eines ambulanten und einfach durchzuführenden Verfahrens, angepasst werden.





ERGONOMISCHESPUMPEN DESIGN

Die weiche Silikonpumpe hat ein leicht zu ertastendes Design, welches eine einfache Bedienung durch den Patienten ermöglicht. Mit nur einmal pumpen wird die Harnröhre dekomprimiert und die Miktion ermöglicht.



VICTO ist bereits vorkonnektiert und kann direkt befüllt und implantiert werden.



VICTO ist in fünf Manschettengrößen erhältlich, welche intraoperativ mit dem zugehörigen Maßband aus dem Accessories Kit ausgewählt werden kann.











VERFAHREN ZUR **AKTIVIERUNG & ANPASSUNG**



4-6 Wochen

NADELEMPFEHLUNG:

Für die Befüllung oder Flüssigkeitsentnahme während der Aktivierung, Anpassung oder Deaktivierung von VICTO wird die Verwendung einer nicht stanzenden Nadel Größe 25G empfohlen.

ZWECKBESTIMMUNG

VICTO ist für die Wiederherstellung der Harnkontinenz der definierten Patientengruppe bestimmt.

INDIKATIONEN

VICTO ist für die Behandlung der männlichen Belastungsharninkontinenz bestimmt.

KONTRAINDIKATIONEN

- Unkontrollierte Detrusorüberaktivität
- Unbehandelte oder irreversible intravesikale Obstruktion
- Beeinträchtigte kognitive oder manuelle Fähigkeiten, die den Patienten in der Handhabung des Implantats einschränken
- Unbehandelte akute Harnwegsinfektion oder aktive Infektion an den Operationsstellen (z. B. Perineum, Skrotum, Unterbauch)
- Bekannte Allergie gegen Silikon.